



1
Waschen Sie Ihre Hände gemäß den Anweisungen Ihres medizinischen Fachpersonals und legen Sie alle Materialien bereit, die Sie zum Katheterisieren benötigen.



2
Um die Verpackung zu öffnen, stecken Sie einen Finger etwa bis zur Hälfte durch die vorgestanzte Fingeröffnung. Ziehen Sie die Verpackung mit leichtem Zug entlang des markierten Pfeils nach unten auf. Lassen Sie den Katheter in der geöffneten Verpackung auf einer sicheren Ablagefläche liegen, während Sie sich anschließend auf das Katheterisieren vorbereiten.

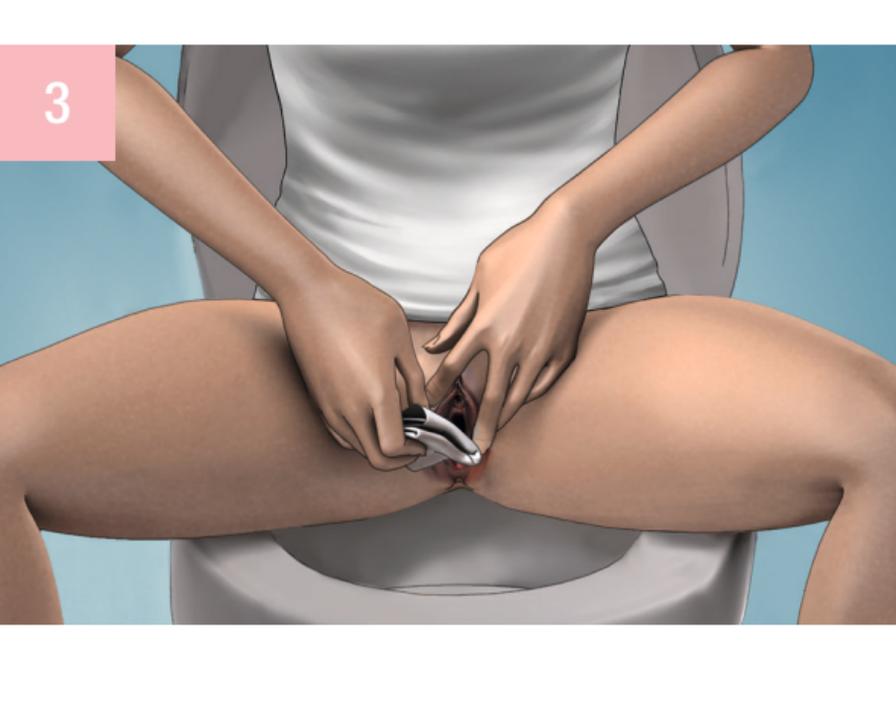

3
Spreizen Sie die Schamlippen und reinigen Sie den Harnröhreneingang mit einer milden, nicht parfümierten Seife. Desinfizieren Sie den Bereich anschließend mit einem Schleimhautdesinfektionsmittel. Achten Sie dabei auf die vom Hersteller empfohlene Einwirkzeit.

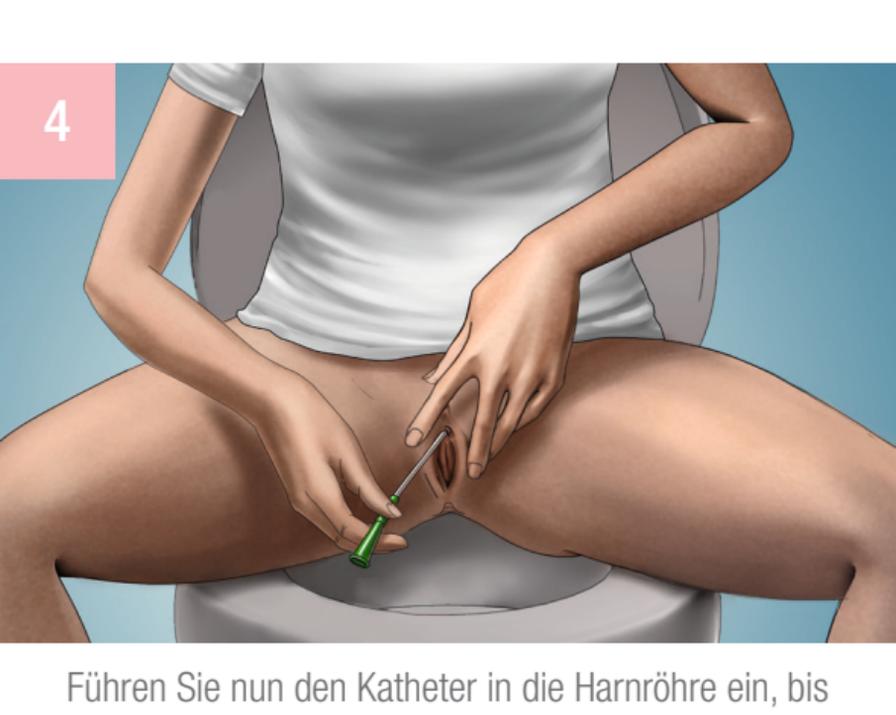


4
Führen Sie nun den Katheter in die Harnröhre ein, bis der Urin zu fließen beginnt. Fließt der Urin, können Sie den Katheter noch etwas tiefer einführen (ca. 1 cm). Halten Sie das Katheterende (falls kein Auffangbeutel vorhanden) direkt in die Toilette, so dass der Urin abfließen kann. Nach Ende des Urinflusses ziehen Sie den Katheter zunächst langsam ca. 2,5 cm, Zentimeter für Zentimeter heraus, damit auch der restliche noch verbliebene Urin aus der Blase entleert wird. Entsorgen Sie den Katheter in einem Abfalleimer. Spülen Sie ihn nicht in der Toilette hinunter.



5
Bei Verwendung eines Kathetersystems mit Beutel:

Öffnen Sie den Auffangbeutel an der vorgesehenen Stelle und entleeren Sie ihn in die Toilette. Entsorgen Sie den Katheter in einem Abfalleimer. Spülen Sie ihn nicht in der Toilette hinunter.

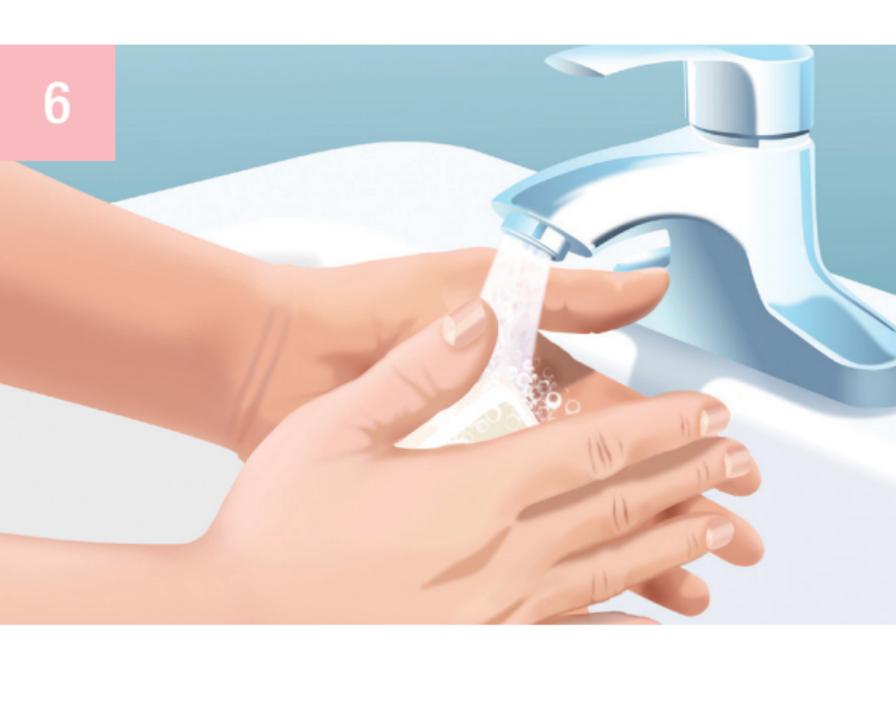

6
Waschen Sie Ihre Hände mit einer milden Seife und Wasser.

WARNHINWEIS: Um das Infektionsrisiko und/oder das Risiko anderer Komplikationen vorzubeugen, darf dasselbe Produkt nicht mehrmals verwendet werden.

WARNHINWEIS: Sollten Beschwerden oder Zeichen einer Traumatisierung der Harnröhre auftreten, brechen Sie den Gebrauch bitte umgehend ab und suchen Sie einen Arzt auf.

- Gebrauchsfertiger Einmalkatheter
- Hydrophil beschichteter phthalatfreier Katheter
- 2 sanfte, abgerundete Augen
- Farbcodierter Ableitungstrichter
- Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Dieser Einmalkatheter ist ein biegsames röhrenförmiges Hilfsmittel, das bei weiblichen und pädiatrischen Patienten, bei denen Urin aus der Blase abgeleitet werden muss, durch die Harnröhre eingeführt wird.

VORSICHTSMABNAHMEN:

Wenn eine der folgenden Indikationen auftritt, suchen Sie bitte vor Gebrauch dieses Produktes den Arzt auf:

- Harnröhrenriss
- Ungeklärte Blutung aus der Harnröhre
- Ausgeprägte Harnröhrenstriktur
- Via falsa
- Urethritis – Entzündung der Harnröhrenschleimhaut

VORSICHTSMABNAHMEN:

Selbstkatheterismus sollte den Behandlungsplan und die Empfehlung Ihres Arztes befolgen und in Übereinstimmung mit der gegebenen Gebrauchsanleitung durchgeführt werden. Da die Häufigkeit der Katheterisierung bei jeder Person anders ist, sollte Ihr Arzt eine Empfehlung über die Häufigkeit Ihrer Katheterisierung abgeben. Sollten Sie andere Fragen über Ihre Katheterisierung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Ihrer medizinischen Fachkraft.

Bitte beachten Sie: Lagern Sie alle Katheterboxen in horizontaler Lage bei normaler Raumtemperatur. Dieses Produkt besteht aus: Trichter aus Polyvinylchlorid und dem phthalatfreiem Schlauch.



Das Hollister Logo sowie Infyna und Infyna Plus sind Warenzeichen von Hollister Incorporated. © 2020 Hollister Incorporated.

LI2264/06.20



Infyna

Gebrauchsfertige intermittierende Einmalkatheter





Hollister Incorporated

Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratung:

Telefon: 0 800 / 1 01 50 23
(gebührenfrei)

beratungsteam@hollister.com

www.hollister.de